

# **NOBAMED Paul Danz AG**

# WATTETUPFER

### **REF 879030**

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt WATTETUPFER ist ein weißer, weicher, Watteballen aus reiner Baumwolle (3 g). Die Watte ist leicht gerollt. Der Tupfer wird zu Reinigungs- und Desinfektionszwecken eingesetzt.

# Zusammensetzung

Baumwolle

#### Hinweis

Vor dem Gebrauch an offenen Wunden, muss die Watte mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden Das Produkt kann mit Feuchter Hitze bei 121°C/ 134°C, 2 bis 3 bar, nach DIN EN 17665, Strahlen nach DIN EN ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO 11135 sterilisiert werden.

### **Ereignisberichterstattung**

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Watte gemäß BP oder USP absorbent cotton

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

# Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus

Zellulose

# Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com







Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

### **Lagerung und Transport**

Trocken und staubfrei

#### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

## **Entsorgung**

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe